


# Bevochtiger

## Quick Start

1

Trek het zwarte zijstuk los van uw CPAP toestel

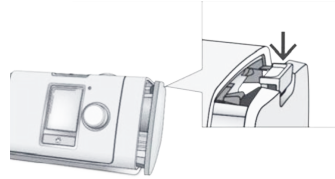


2

Vul de reservoir met water vrij van kalk.  
(gevuld tot +/- max streep)

3

Schuif de reservoir in de opening van uw  
toestel

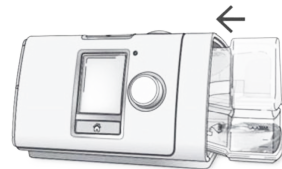

## Veranderen vochtigheidsniveau

1

Duw op het kleine huisje onderaan het scherm.

2

Draai met ronde knop tot MIJN OPTIES blauw wordt. Duw op de ronde knop.

3

Draai met ronde knop tot VOCHTIGHEIDS NIV. blauw wordt. Duw op de ronde knop.

4

Draai naar het gewenste vochtigheidsniveau (Standaard = 4). Duw op de ronde knop om te bevestigen.

5

Uit MENU gaan: duwen op klein huisje.

## Type water gebruiken

- Gedestilleerd water (apotheker)
- Leidingwater: minimum 20 min. laten koken en afkoelen
- Flessenwater

## Kalkaanslag

Spoelen in warm water met verdunde azijn. Verdunnen met 1 volume azijn voor 10 volumes water.

## Onderhoud Bevochtiger

### Dagelijks

- Water verversen
- Slang ontkoppelen en laten uitlekken/drogen

### Wekelijks

- Reinigen met zeep
- Slang uitspoelen

## Tips om condens tegen te gaan

1

Toestel op grond plaatsen

2

Kamer vensters dicht

3

Zachte temperatuur in de slaapkamer

4

Slang onder lakens warmhouden

5

Vochtighedsniveau aanpassen op toestel

